

# Brukerhåndbok elektronisk lupe Compact 7 HD



## Innholdsfortegnelse.

1. Innledning .....	3
Om denne håndboken.....	3
Eskens innhold.....	3
2. Komme i gang. ....	4
Anvendelse av Compact 7 HD i åpen eller lukket stilling.....	4
Renhold av kameralinse og speil.....	5
Knapper, tilkoblinger og kamera.....	5
Slå Compact 7 HD på og av.....	6
Endre forstørrelsen.....	6
Endre visningstype.....	6
Bruke "Bilde"-knappen.....	7
3. Batteri og strømstyring.....	8
Lade batteriet på Compact 7 HD.....	8
Standby og "Automatisk-Av"-funksjon.....	8
Batteri-varsel.....	8
4. Menyen på Compact 7 HD.....	9
Åpne menyen.....	9
Forflytning i menyen.....	9
Avslutte menyen.....	9
Meny: Information – Informasjon.....	10
Meny: Images - Bilder.....	10
Undermeny View - Visning.....	10
Undermeny Delete - Slette.....	10
Undermeny Delete all - Slette alt.....	11
Meny: Brightness - Lysstyrke.....	11
Meny: Power - Strømstyring.....	11
Undermeny Standby – Standby.....	12
Undermeny Power off - Strøm av.....	12
Undermeny Open - Åpne.....	12
Undermeny Close – Lukke.....	12
Meny: Beep – Lydsignaler.....	13
Meny: Light – Belysning.....	13
Meny: Color - Fargekombinasjoner.....	13
Meny: Reset - Tilbakestille.....	14
Appendix A: Sikkerhet.....	15
Appendix B: Tekniske data.....	16
Appendix C: Garantibetingelser.....	17

# 1. Innledning

Gratulerer med din nye Compact 7 HD!

Optelecs elektroniske luper utstyrt med autofokusering, sørger for at du kan se på og forstørre trykksaker og bilder i HD-kvalitet eller høykontrast-visning. Skjermen på Compact 7 HD på hele sju tommer i kombinasjon med lupens minste forstørrelse på 2,5 ganger, sørger for at du får godt overblikk samtidig som du kan forstørre bilder og tekst inntil 30 ganger.

Med sine praktiske funksjoner, gode belysning, autofokus og sammenleggbare lesestativ, kan Compact 7 HD brukes til å se på og lese slikt som bilder, prisetiketter, plakater og mye annet både hjemme eller når du er på farten.

Dersom du har spørsmål om eller forslag til forbedringer for bruken av denne enheten, ber vi deg ta kontakt med leverandøren eller Optelecs hovedkvarter på adressen du finner nedenfor. Vi setter stor pris på tilbakemeldingene dine, og håper du vil like å arbeide med din Compact 7 HD.

## **Optelec Europe**

Breslau 4

2993 LT Barendrecht

The Netherlands.

T: +31 (0)88 678 3444

[www.optelec.com](http://www.optelec.com)

## **Om denne håndboken.**

Optelec har alltid for øye å forbedre sine produkter og deres funksjoner. Følgelig er det en mulighet for at denne bruksanvisningen ikke er siste utgave, og ved behov ber vi deg derfor å laste ned nyeste utgave fra Support-fanen på [www.optelec.com](http://www.optelec.com).

Ved hjelp av denne bruksanvisningen blir du kjent med funksjonene på Compact 7 HD og hvordan du betjener den. Vi anbefaler at du leser gjennom denne bruksanvisningen før enheten tas i bruk.

## **Eskens innhold.**


Ved levering av Compact 7 HD skal følgende være med:

- Selve Compact 7 HD.
- Beskyttende bærepose.
- Håndledds-stropp.
- Strømforsyning eller lader.
- 4 forskjellige plugger for strømforsyningen, disse passer i Europa, USA, Storbritannia og Australia.
- Klut for rengjøring av kameralinse og speil.
- Bruksanvisning på sortskrift.

Hvis noe av dette mangler ved levering, må du ta kontakt med leverandøren.


## 2. Komme i gang.

Plassér Compact 7 HD på et bord foran deg slik at skjermen vender oppover samtidig som den store, hvite knappen og den oransje "Av/ På"-knappen vender mot deg.

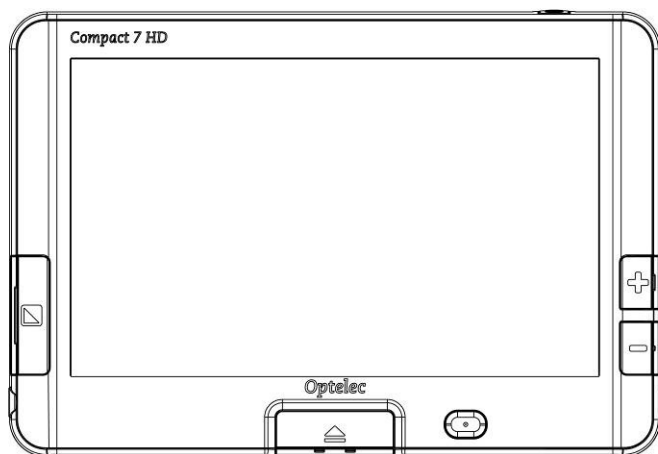


### Anvendelse av Compact 7 HD i åpen eller lukket stilling.

Compact 7 HD kan brukes på to forskjellige måter - enten i lukket eller åpen stilling. I lukket posisjon brukes lupen ved at du holder den med én eller to hender, og vender kameraet, som sitter på lupens bakside, mot arket eller gjenstanden du vil se på. Lukket stilling er svært nyttig når du raskt vil se på plakater, hylleforlanter etc. som du gjerne ikke kan holde lupen helt inntil.

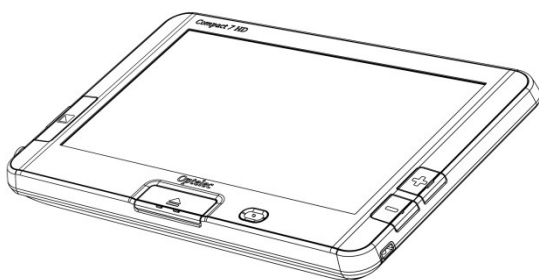

**Compact 7 HD i lukket stilling**

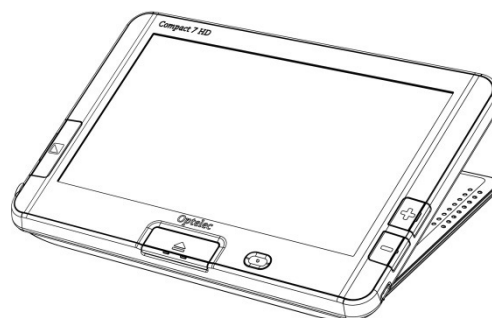


**Compact 7 HD i åpen stilling**

I åpen stilling vil skjermen være i en skrånende vinkel i forhold til underlaget, slik at den ergonomisk sett står i en bedre stilling. Takket være det innebygde lesestativet, vil du klare å lese mer og lenger.

Gå frem som følger for å åpne enheten:

1. Plasser Compact 7 HD foran deg slik at skjermen vender oppover og den store hvite knappen og den oransje Av/ På-knappen vender mot deg.
2. Trykk på den hvite knappen fremst på skjermen for å åpne enheten. Compact 7 HD vil nå åpne seg og bli slått på.

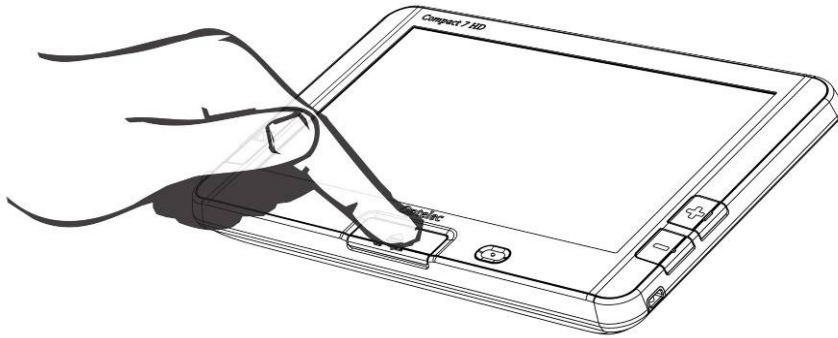

## Renhold av katedralinse og speil.

For å få best mulig bildekvalitet, må katedralinsen og speilet holdes rene. En uren linse vil føre til at bildet er uklart og at autofokus-funksjonen på det innbygde kameraet i Compact 7 HD ikke vil fungere korrekt. Samtidig vil et rent speil gjøre at du unngår hvite eller sorte flekker i bildet og at dokumentbelysningen gir jevnt lys. Ved renhold av linse og speil skal den medfølgende rengjøringskluten eller annen klut beregnet for linser benyttes.

**NB!** Vann eller andre rengjøringsmidler må ikke benyttes ved rengjøring av linse og speil.

## Knapper, tilkoblinger og kamera.

Nedenfor følger en forklaring på betjeningsknappene, tilkoblinger og kamera på Compact 7 HD.

Åpne



Trykk på den hvite knappen fremst på skjermen for å åpne Compact 7 HD og slå den på.

”Modus”-knappen



Ved å trykke på ”Modus”-knappen til venstre på skjermen én eller flere ganger, kan du velge mellom de tilgjengelige visningstypene. Dersom ”Modus”-knappen holdes nede i tre sekunder, blir dokumentbelysningen slått av, denne slås da på igjen ved å holde knappen nede i nye tre sekunder.

Forstørrelse



Ved å trykke på ”+”- eller ”-“knappene på høyre side av skjermen, blir forstørrelsesnivået henholdsvis økt eller senket. Dersom ”+”- og ”-“knappene samtidig holdes nede i ett sekund vil menyen på Compact 7 HD åpnes eller lukkes.

”Bilde”-knappen



Ved hjelp av ”Bilde”-knappen til høyre på øvre ende av Compact 7 HD, kan du ta midlertidige bilder av ark eller gjenstander som er på litt avstand. Du kan deretter flytte lupen nærmere øynene for å se nærmere på bildet og eventuelt lagre det for senere bruk.


”Av/ På”-knappen



Du slår Compact 7 HD av eller på ved å holde den oransje, ovale ”Av/ På”-knappen fremst på skjermen nede i ett sekund.

## Strøm-inngang

Strøm-inngangen er plassert i nedre venstre hjørne av Compact 7 HD, koble ledningen fra strømforsyningen til her. Av sikkerhetshensyn skal kun strømforsyningen som fulgte med ved levering brukes ved opplading eller bruk av enheten.

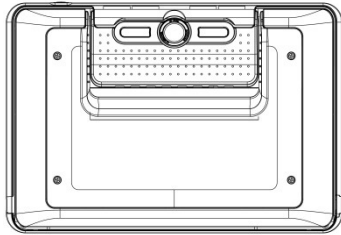

Kameraet på Compact 7 HD er plassert på dens bakside. På begge sider av kameraet er det plassert LED-dioder som brukes til å belyse ark eller andre gjenstander når enheten er i lukket stilling.

## Slå Compact 7 HD på og av.

Før Compact 7 HD kan slås på første gang, må den lades opp. Når dette er gjort, trykker du og holder den ovale, oransje “Av/ På”-knappen nede i ett sekund. Enheten startes med samme visningstype som den sto i forrige gang den ble slått av. Dersom du vil slå av Compact 7 HD, holder du igjen “Av/ På”-knappen nede i ett sekund.

Når Compact 7 HD har vært helt avslått, vil det ta omtrent tre sekunder før bilde vises på skjermen.

Dersom innstillingene ikke er blitt endret, vil Compact 7 HD automatisk slå seg på når den åpnes samtidig som den automatisk vil slå seg av når den lukkes. Dersom du ønsker å endre dette, henviser vi til kapittel fire for nærmere forklaring.

## Endre forstørrelsen.

Trykk på “+”- eller “-”-knappen på høyre side av skjermen for å forandre forstørrelsen, “+”-knappen vil øke forstørrelsen mens “-”-knappen vil senke den. Når lupen er åpen, er dens minste forstørrelse 2,5 ganger mens største forstørrelse er 30. Compact 7 HD er utstyrt med kamera med autofokus, og dette gjør at du også kan benytte lupen når den er lukket, men dette vil da føre til at spennet i forstørrelsesgrad ikke er like stor.

## Endre visningstype.

Trykk på “Modus”-knappen på skjermens venstre side én eller flere ganger dersom du vil skifte til en av følgende visningstyper:

**Fullfarge-modus:** Viser dokumenter, bilder eller gjenstander i farger.

**Negativ-modus:** Viser dokumenter oa. med høykontraster, hvitt på svart.

**Positiv-modus:** Viser dokumenter oa. med høykontraster, svart på hvitt.

Høy-kontrast-visning med **fargekombinasjon 1**.

Høy-kontrast-visning med **fargekombinasjon 2**.

Dersom du holder “Modus”-knappen nedtrykket i tre sekunder, vil dokumentbelysningen vekselvis slås av eller på. Dersom dokumentbelysningen er slått av og du endrer visningstype, vil dette føre til at belysningen slås på.

## Bruke “Bilde”-knappen.

Ved hjelp av “Bilde”-knappen, kan du få tatt et midlertidig bilde av et ark eller en gjenstand. Gå frem slik:

- Hold eller sett Compact 7 HD over arket eller gjenstanden du vil ta bilde av.
- Trykk på “Bilde”-knappen øverst på høyre side av skjermen for å ta bildet.
- Flytt Compact 7 HD nærmere opp mot øynene slik at du kan se nærmere på bildet du har tatt.
- Trykk om ønskelig på “Modus”-knappen for å skifte visningstype.
- Trykk om ønskelig på forstørrelses-knappene på høyre side av skjermen for å endre forstørrelsesgrad for bildet.
- Om ønskelig kan bildet lagres på minnet på Compact 7 HD. Hold i så tilfelle inne “Bilde”-tasten i to sekunder for å lagre bildet og deretter gå tilbake til vanlig visning. Et kort lydsignal og en melding på skjermen varsler deg om at bildet er blitt lagret. Inntil 75 bilder kan lagres på enheten, dersom du lagrer flere bilder vil det nyeste erstatte det eldste.
- Trykk på “Bilde”-knappen dersom du vil avslutte visning av bildet du har tatt og gå tilbake til vanlig visning, herfra kan du nå ta nye bilder.

**NB!** Dersom “Bilde”-knappen slippes opp før det er gått to sekunder, blir ikke bildet lagret.

For forklaring på fremgangsmåte for å se på eller slette bilder, henviser vi til kapittel fire.

### **3. Batteri og strømstyring.**

#### **Lade batteriet på Compact 7 HD.**

Compact 7 HD leveres med strømforsyning eller lader med 4 utskiftbare plugger som passer henholdsvis i Europa, USA, Storbritannia og Australia. Sett den pluggen som passer for landet du bor i på plass på strømforsyningen før du setter strømforsyningen inn i en stikkontakt.

Når du vil lade Compact 7 HD, må du koble ledningen som kommer fra strømforsyningen til i strømkontakten nederst på venstre side av lupen og sette strømforsyningen inn i en stikkontakt. En liten varselampe rett ved strømkontakten vil lyse fast med oransje lys så lenge lading pågår for så å skifte til grønt lys når ladingen er fullført. Dersom varselampen blinker, er det oppstått et problem under ladingen, du må da koble fra ledningen og prøve på nytt.

Selve ladingen av Compact 7 HD vil ta omtrent tre og en halv time. Når Compact 7 HD er fullt oppladet, kan den i gjennomsnitt benyttes i fem timer alt ettersom hvordan innstillingene for strømstyring er satt. Legg merke til at av sikkerhetshensyn skal kun den strømforsyningen som ble levert sammen med Compact 7 HD brukes ved lading og bruk av enheten.

#### **Standby og “Automatisk-Av”-funksjon.**

Dersom Compact 7 HD ikke brukes aktivt, vil den for å spare på batteriet automatisk gå i “Standby” etter to minutter. Du kan da trykke på hvilken som helst av knappene for å slå den på igjen. Etter ytterligere fire minutter vil den slå seg helt av, og nå må du holde “Av/ På”-knappen nedtrykket i ett sekund for å slå den på. Både “Standby”- og “Automatisk-Av”-intervallet kan endres fra menyen på Compact 7 HD, vi henviser til kapittel fire for nærmere forklaring på hvordan dette gjøres.

#### **Batteri-varsel.**



Når gjenværende batterikapasitet går under 5 %, vil du varsles om dette med et “Batteri”-symbol på skjermen og et lydsignal, dette blir gjentatt hvert minutt. Når dette inntreffer, må du sørge for å lade Compact 7 HD så fort som mulig. Når batteriet ikke klarer å drive lupen lenger, vil den slås helt av.


Dersom du skulle oppleve av Compact 7 HD ikke vil slå seg på, må du kontrollere at den er oppladet.



## 4. Menyen på Compact 7 HD.


Viser status for batteriet og programvareversjon.	
Herfra kan du få vist eller slettet lagrede bilder.	
Her kan du justere lysstyrken.	
Herfra kan du endre innstillingene for strømstyring.	
Herfra kan du slå lydsignalene av og på.	
Herfra kan du slå av og på dokumentbelysningen.	
Herfra kan du endre fargekombinasjonene for de fire høykontrast-visningene.	
Herfra kan du tilbakestille alle innstillingene.	

### Åpne menyen.

 For å åpne menyen trykker du samtidig på "+"- og "-"-knappene og holder dem nede i to sekunder.




### Forflytning i menyen.

 Bruk "+"- og "-"-knappene til å flytte mellom de forskjellige meny-punktene, og trykk på Modus-knappen for å gå inn på en meny eller bekrefte et valg. Bruk "+"- eller "-"-knappene til å bla mellom forskjellige valgmuligheter.



### Avslutte menyen.

 For å avslutte menyen trykker du samtidig på "+"- og "-"-knappene og holder dem nede i to sekunder.



## Meny: Information – Informasjon.



Fra menypunktet "Information", kan du få vist status for enhetens batteri samt programvareversjonen som er installert på den. Ingen innstillinger kan gjøres fra dette menypunktet.

- Åpne menyen ved samtidig å trykke på "+"- og "-"-knappen i to sekunder.
- "Information" er første punkt som vises når du åpner menyen. Bla eventuelt til menypunktet "Information" med "+"- eller "-"-knappen hvis du står på et annet menypunkt og vil gå tilbake til "Information".
- Bla eventuelt videre til andre menypunkter med til "+"- eller "-"-knappen.
- Trykk på "Modus"-knappen eller samtidig på "+"- og "-"-knappen i to sekunder for å avslutte menyen.

## Meny: Images - Bilder.




Dette menypunktet har tre undermenyer:

- Visning - View: Se på de lagrede bildene.
- Slette - Delete: Slette lagrede bilder.
- Slette alt - Delete all: Slette alle lagrede bilder.

### Undermeny View - Visning.

Se på lagrede bilder:

- Åpne menyen ved samtidig å trykke på "+" - og and "-"-knappen i to sekunder.
- Bruk "+"-knappen til å bla oppover i menyen og "-"-knappen til å bla nedover, gå til menypunktet "**Images**" og trykk på "Modus"-knappen.
- Bla til menypunktet "**View**" med "+"- eller "-"-knappen og trykk på "Modus"-knappen.
- Bla oppover i de lagrede bildene med "+"-knappen eller nedover i bildene med "-"-knappen.
- Trykk på "Modus"-knappen for å avslutte menyen.

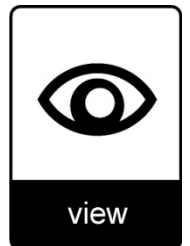

### Undermeny Delete - Slette.

Slette lagrede bilder:

- Åpne menyen ved samtidig å trykke på "+"- og "-"-knappen i to sekunder.
- Bruk "+"-knappen til å bla oppover i menyen og "-"-knappen til å bla nedover, gå til menypunktet "**Images**" og trykk på "Modus"-knappen.
- Bla til menypunktet "**Delete**" med "+"- eller "-"-knappen og trykk på "Modus"-knappen.
- Bla til bildet du vil slette.
- Trykk på "Modus"-knappen for å slette bildet.
- Trykk på "-"-knappen for å slette bildet.
- Trykk på "+"-knappen for å avbryte.
- Trykk på "Modus"-knappen for å avslutte menyen.



## Undermeny Delete all - Slette alt.

Slette alle lagrede bilder:

- Åpne menyen ved samtidig å trykke på "+" - og "-" -knappen i to sekunder.
- Bruk "+"-knappen til å bla oppover i menyen og "-"-knappen til å bla nedover, gå til menyunktet "**Images**" og trykk på "Modus"-knappen.
- Bla til menyunktet "**Delete all**" med "+"- eller "-"-knappen og trykk på "Modus"-knappen.
- Trykk på "-"-for å slette alle lagrede bilder.
- Trykk på "+"-knappen for å avbryte.
- Trykk på "Modus"-knappen for å avslutte menyen.



## Meny: Brightness - Lysstyrke.



Fra dette menyunktet kan du justere lysstyrken på skjermen:

- Åpne menyen ved samtidig å trykke på "+"- og "-"-knappen i to sekunder.
- Bruk "+"-knappen til å bla oppover i menyen og "-"-knappen til å bla nedover, gå til menyunktet "**Brightness**" og trykk på "Modus"-knappen.
- Velg lysstyrkenivå fra 1 til 5 med "+" eller "-"-knappen, her er 5 sterkeste lysstyrke mens 1 er svakest. Standardverdi er 4.
- Trykk på "Modus"-knappen for å bekrefte og avslutte menyen.

## Meny: Power - Strømstyring.



Dette menyunktet har fire undermenyer:




Standby

Innstilling av tidsintervallet som brukes før Compact 7 HD går i "Standby" for å spare på batteriet. Trykk på hvilken som helst av knappene for å slå enheten på igjen. Standardverdi for "standby"-intervallet er to minutter.




Strøm av

Innstilling av tidsintervallet som brukes før Compact 7 HD automatisk slås av. Standardverdi for "Automatisk-Av"-intervallet er fire minutter. Disse fire minuttene begynner å løpe med en gang enheten går i "Standby". På denne måten vil Compact 7 HD slås av etter seks minutter.

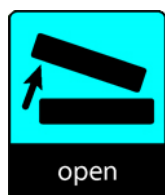

Åpne

Herfra kan du styre om Compact 7 HD automatisk skal slå seg på eller ikke når den blir åpnet. Som standard vil den slås på.

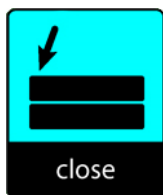

Lukke

Herfra kan du styre om Compact 7 HD automatisk skal slå seg av eller ikke når den blir lukket. Som standard vil den slås av.

### Undermeny Standby – Standby.

Som standardverdi er “Standby”-intervallet satt til to minutter. Gå frem som følger for å endre denne verdien:

- Åpne menyen ved samtidig å trykke på “+”- og “-”-knappen i to sekunder.
- Bruk “+”-knappen til å bla oppover i menyen og “-”-knappen til å bla nedover, gå til menyunktet **“Power”** og trykk på “Modus”-knappen.
- Bla til menyunktet **“Standby”** med “+”- eller “-”-knappen og trykk på “Modus”-knappen.
- Velg hvilket tidsintervall lupen skal benytte før Compact 7 HD skal gå i “Standby” eller strømsparing, du øker intervallet ved å trykke på “+”-knappen og minsker det ved å trykke på “-”-knappen. Dersom du velger “DISABLED”, deaktiverer du strømsparings-funksjonen.
- Trykk på “Modus”-knappen for å bekrefte og avslutte menyen.

### Undermeny Power off - Strøm av.

Som standardverdi er “Automatisk-Av”-intervallet satt til 4 minutter. Gå frem som følger for å endre denne verdien:

- Åpne menyen ved samtidig å trykke på “+”- og “-”-knappen i to sekunder.
- Bruk “+”-knappen til å bla oppover i menyen og “-”-knappen til å bla nedover, gå til menyunktet **“Power”** og trykk på “Modus”-knappen.
- Bla til menyunktet **“Power off”** med “+”- eller “-”-knappen og trykk på “Modus”-knappen.
- Velg hvilket tidsintervall lupen skal benytte før Compact 7 HD skal gå slå seg helt av, du øker intervallet ved å trykke på “+”-knappen og minsker det ved å trykke på “-”-knappen. Dersom du velger “DISABLED”, deaktiverer du “Automatisk-Av”-funksjonen.
- Trykk på “Modus”-knappen for å bekrefte og avslutte menyen.

### Undermeny Open - Åpne.

Gå frem som følger for å slå av eller på “Automatisk-På”-funksjonen når lupen åpnes:

- Åpne menyen ved samtidig å trykke på “+”- og “-”-knappen i to sekunder.
- Bruk “+”-knappen til å bla oppover i menyen og “-”-knappen til å bla nedover, gå til menyunktet **“Power”** og trykk på “Modus”-knappen.
- Bla til menyunktet **“Open”** med “+”- eller “-”-knappen og trykk på “Modus”-knappen.
- Velg “POWER ON” dersom du ønsker at lupen skal slås på når den åpnes eller “NO ACTION” dersom du ikke vil at den skal slås på når den åpnes.
- Trykk på “Modus”-knappen for å bekrefte og avslutte menyen.

### Undermeny Close – Lukke.

Gå frem som følger for å slå av eller på “Automatisk-Av”-funksjonen når lupen lukkes:

- Åpne menyen ved samtidig å trykke på "+"- og "-"-knappen i to sekunder.
- Bruk "+"-knappen til å bla oppover i menyen og "-"-knappen til å bla nedover, gå til menypunktet **"Power"** og trykk på "Modus"-knappen.
- Bla til menypunktet **"Close"** med "+"- eller "-"-knappen og trykk på "Modus"-knappen.
- Velg "POWER OFF" dersom du ønsker at lupen skal slås av når den lukkes eller "NO ACTION" dersom du ikke vil at den skal slås av når den lukkes.
- Trykk på "Modus"-knappen for å bekrefte og avslutte menyen.

### Meny: Beep – Lydsignaler.



Fra dette menypunktet kan du slå av eller på lydsignalene på Compact 7 HD. Som standard står lydsignalene på.

- Åpne menyen ved samtidig å trykke på "+"- og "-"-knappen i to sekunder.
- Bruk "+"-knappen til å bla oppover i menyen og "-"-knappen til å bla nedover, gå til menypunktet **"Beep"** og trykk på "Modus"-knappen.
- Velg "ON" dersom du ønsker at lydsignalene skal være på, eller "OFF" dersom du vil at de skal være av.
- Trykk på "Modus"-knappen for å bekrefte og avslutte menyen.

### Meny: Light – Belysning.



Fra dette menypunktet kan du slå av eller på dokumentbelysningen. Ved levering er dokumentbelysningen slått på.

- Åpne menyen ved samtidig å trykke på "+"- og "-"-knappen i to sekunder.
- Bruk "+"-knappen til å bla oppover i menyen og "-"-knappen til å bla nedover, gå til menypunktet **"Light"** og trykk på "Modus"-knappen.
- Velg "ON" dersom du ønsker at belysningen skal være på, eller "OFF" dersom du vil at den skal være av.
- Trykk på "Modus"-knappen for å bekrefte og avslutte menyen.

### Meny: Color - Fargekombinasjoner.



Compact 7 HD har innbygget fire visninger i høykontrast. For hver av disse visningene kan du velge hvilken fargekombinasjon som skal benyttes, og tre av dem kan deaktiveres hvis du ikke har bruke for alle disse visningstypene.

- Åpne menyen ved samtidig å trykke på "+"- og "-"-knappen i to sekunder.
- Bruk "+"-knappen til å bla oppover i menyen og "-"-knappen til å bla nedover, gå til menypunktet **"Color"** og trykk på "Modus"-knappen.
- Bruk "+"- eller "-"-knappen, gå til den høykontrastvisningen du vil endre og trykk på "Modus"-knappen for å bekrefte.
- Bruk "+"- eller "-"-knappen og bla til den fargekombinasjonen du vil ha for den aktuelle høykontrastvisningen. Høykontrastvisning 2, 3 og 4 kan om ønskelig deaktiveres ved at du velger "DISABLED".
- Trykk på "Modus"-knappen for å bekrefte og avslutte menyen.

## Meny: Reset - Tilbakestill.



Fra dette menypunktet kan du sette alle innstillingene på Compact 7 HD tilbake til verdiene de hadde ved levering:

- Åpne menyen ved samtidig å trykke på "+"- og "-"-knappen i to sekunder.
- Bruk "+"-knappen til å bla oppover i menyen og "-"-knappen til å bla nedover, gå til menypunktet "**Reset**" og trykk på "Modus"-knappen.
- Velg "YES" dersom du ønsker å tilbakestille alle innstillingene, eller "NO" dersom du vil la innstillingene være slik de var.
- Trykk på "Modus"-knappen for å bekrefte og avslutte menyen.

## Appendix A: Sikkerhet.

Compact 7 HD er designet slik at den kan benyttes til generell bruk i sykehusmiljøer, f.eks. til gjennomgang av journaler. Compact 7 HD skal ikke brukes ved operative inngrep i kombinasjon med medisinsk utstyr.

Advarsel: Kritiske, diagnostiske avgjørelser må ikke baseres på bilder fra denne enheten.

- For å unngå brannfare, må ikke Compact 7 HD utsettes for høye temperaturer eller direkte sollys.
- Ikke fjern noen av delene på Compact 7 HD. Ta kontakt med leverandøren dersom du har behov for service på enheten.
- For å unngå fare for elektriske støt, må Compact 7 HD holdes borte fra væsker og kjemikalier.
- Behandle Compact 7 HD med omtanke. Uvøren håndtering av enheten vil forårsake skade på dens innvendige deler.
- Ikke anvend Compact 7 HD i nærheten av utilstrekkelig skjermet medisinsk utstyr.
- Ikke forsøk å åpne batterirommet eller fjerne batteriet.
- Ta kontakt med leverandøren ved behov for service på enheten. Ikke demontér enheten, dette vil føre til at garantien oppheves.
- Sørg alltid for å koble Compact 7 HD fra strømforsyningen og slå enheten helt av før rengjøring. Bruk kun tørre, myke kluter under rengjøringen. Tekniske rensedmidler og vaskemidler med slipende virkning må ikke brukes da slike vil skade enheten.

Annen bruk av Compact 7 HD enn den som beskrives i denne håndboken, vil oppheve leverandørens garantiansvar.

## Appendix B: Tekniske data.

Forstørrelse:	2,5 – 30 ganger.
Visningstyper:	Fullfarge-visning. Høykontrast, hvitt på svart. Høykontrast, svart på hvitt. Høykontrast, fargekombinasjon 1. Høykontrast, fargekombinasjon 2.
Fokusering:	Auto-fokus.
Høykontrast forhold:	500:1.
Skjerm med høy lysstyrke:	500 cd/m <sup>2</sup> .
Skjermtype:	7" TFT.
Skjermens oppløsning:	800 x 480.
Størrelse:	190x130x27mm.
Batteri	Gjennomsnittlig 5 timer brukstid. Gjennomsnittlig 3,5 timer ladetid.
Li-Ion-batteri	Oppladbart, 3,7V, 2800mAh.
Vekt:	640 gram.
Lader-/ Strømforsyningstype:	Adapter Technology Co., Ltd., ATS024T-W120V.
Inngangsspenning lader:	100-240VAC, 50-60Hz, 0,3A.
Inngangsspenning Comp. HD 7:	12VDC, 2A.

### Bruksområder:

Temperatur:	+10 °C to 35 °C.
Luftfuktighet:	< 70%, ingen dråpedannelse.
Høyde over havet:	opp til 3000 m (9842 fot).
Luftrykk:	700 – 1060 hPa.

### Forhold ved oppbevaring og transport:

Temperatur:	+10°C to 40°C.
Luftfuktighet:	< 95%, ingen dråpedannelse.
Høyde over havet:	opp til 12192 m (40000 fot).
Luftrykk:	186 – 1060 hPa.



## Appendix C: Garantibetingelser.

Optelec garanterer at Compact 7 HD ved leveringen ikke innehar feil på materialer eller sammensetning. Compact 7 HD er produsert med tanke på innendørs, privat bruk hjemme eller andre steder man har behov for en elektronisk lupe. Optelec forbeholder seg retten til å reparere eller erstatte enhver Compact 7 HD med et lignende eller bedre produkt. I tilfelle feil på produktet, består brukers mulighet til utbedring kun i utskifting av tilbehør. Optelec eller Otelecs agenter kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skader som måtte oppstå som følge av anvendelse av dette produktet, og Optelec påtar seg heller ikke ansvar dersom det blir anvendt på annen måte enn det som omtales i denne håndboken. Garantien gjelder kun i samme land som produktet opprinnelig ble solgt i, og kun dersom produktets forseglinger er intakte. Ved reparasjoner utenfor garantitiden, ber vi deg ta kontakt med leverandøren.

Advarsel: Endringer av utstyret må kun utføres etter samtykke med produsenten.  
Advarsel: For å redusere risikoen for elektriske støt, må denne enheten kun tilkobles jordet stikkontakt.

Advarsel: Den medfølgende strømforsyning/ lader PW-M024A-1Y120K er å betrakte som en del av Compact 7 HD.

### Symboler brukt i denne håndboken:



Advarsel, henvisning til medfølgende dokumentasjon.



Gå frem som beskrevet i brukerhåndboken.



STAND-BY.



Likespenning.

### Kassering av produktet og merknad om WEEE.

Direktivet om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE), som ble vedtatt som europeisk lov den 3. desember 2008, resulterte i store endringer i behandlingen av elektrisk avfall etter endt levetid.

Formålet til dette direktivet er, som første prioritet, å begrense avfallsmengden fra elektrisk utstyr og dernest å oppfordre til gjenbruk, resirkulering og gjenvinning av slikt avfall for å redusere ressursene som går til spille.



WEEE logoen (vist til venstre) på produktet eller dets emballasje, indikerer at dette produktet ikke må kastes sammen med vanlig restavfall. Du er selv ansvarlig for at alt ditt avfall fra elektrisk eller elektronisk utstyr blir levert til innsamlingspunkt for gjenvinning av slikt farlig avfall. Sortert innsamling og korrekt håndtering av slikt avfall vil hjelpe til med å ta vare på naturressursene. I tillegg vil korrekt resirkulering av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr bidra til forbedret helse og miljø. For mer informasjon om håndtering av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr, gjenvinning og innsamlings- og gjenvinningspunkter for slikt avfall,

kan du ta kontakt med kommunen der du bor, utsalgsstedet der du kjøpte produktet eller importøren eller produsenten av produktet.

### **RoHS-oppfyllelse.**

Dette produktet samsvarer med Direktiv 2011/65/EU fra Europa-Parlamentet og fra Council of 1<sup>st</sup> July 2011, om begrensning av bruk av enkelte skadelige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS).

### **Merknad for den Europeiske Union.**

Produkter med CE-merking samsvarer med EMC-direktivet (2014/30/EU), MDD-direktivet (93/42/EEC) og Lavspennings-direktivet (2014/35/EU) utgitt av Europa-Kommisjonen.

Samsvar med disse direktivene impliserer samsvar med følgende internasjonale standarder:

EMC :	FCC :	Sikkerhet :
EN 55032	FCC part 15 Class B	UL 60950-1
EN 55024		EN 60601-1-1
EN 60601-1-2		

**Advarsel:** Anvendelse av tilbehør, sendere og kabler, med unntak av sendere og kabler levert som reservedeler av produsenten av Compact 7HD, kan forårsake økt utstråling fra Compact 7 HD og redusert toleranse mot slik stråling utenfra.

 Denne enheten er utstyrt med CE- og FCC-merke.

### **Merknad om FCC:**

Dette produktet er testet og er i samsvar med grenseverdiene for en digital enhet i Klasse B i henhold til FCC-reglens kapittel 15. Disse grenseverdiene er satt opp for å gi rimelig beskyttelse mot skadelige forstyrrelser i et privat hjem. Produktet genererer, benytter og kan avgi radiostråling. Dersom det ikke installeres i henhold til beskrivelsen, kan det forårsake forstyrrelser på radio-kommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at forstyrrelser ikke vil oppstå under gitte forhold i enkelte installasjoner. Hvis dette utstyret forårsaker forstyrrelser på radio- eller TV-mottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere forstyrrelsene med ett eller flere av følgende tiltak:

- Snu eller flytt antennen.
- Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til et uttak på en annen kurs enn den mottakeren er koblet til.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio- eller TV-tekniker for hjelp.

For å forsikre at produktet alltid samsvarer med aktuelt regelverk, skal det ved tilkobling til PCer eller annet datautstyr kun benyttes skjermede forbindelseskabler

med monterte ferritt-kjerner. Eventuelle endringer som ikke uttrykkelig er godkjent av selskapet som er ansvarlig for samsvar med reglene, kan sette brukeren i fare for å miste bruksretten til produktet.

Denne enheten samsvarer med del 15 av FCC-reglene, bruken er underlagt følgende to vilkår:

(1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelige forstyrrelser, og

(2) Denne enheten må tolerere all forstyrrelse som mottas, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket virkning.

**Egne notater:**

Dersom du skulle ha behov for ytterligere opplysninger om Compact 7 HD, ber vi deg ta kontakt med Adaptor Hjelpemidler AS på telefon 23215555 eller sende en e-post til [hjelpemidler@adaptor.no](mailto:hjelpemidler@adaptor.no).