

Diana norsktalende armbandsur (Talk Tech)

Innstilling av tid og ukedag

NB! Husk at viserne og talen må stilles hver for seg.

Bruk en kulepenn og trykk inn i hullet K2, K3, eller K4 for å stille talen. E.ks, Ett trykk i K3 vil stille klokken én time frem.



Klokken kan annonsere klokkeslettet enten på analogt eller digitalt vis. Hvordan klokkeslettet leses opp, endres når man ved innstilling passerer kl. 0 eller 12 midnatt. Dersom du vil endre annonseringen, må du derfor i praksis stille klokken frem 24 timer. Gå frem som følger for å stille klokkeslettet:

1. Trykk gjentatte ganger på K3 på venstre side av uret for å stille timene, K2 på høyre side for å stille minuttene og K4 for å stille ukedagen.
2. Trykk til slutt på K1 for å kontrollere at klokkeslettet er korrekt og at det leses opp på ønsket måte.